



# FUTURO™ PERFORMANCE FOTLEDSSTÖD

46645



STABILT  
STÖD



VENTILERANDE  
MATERIAL



FUKTAVLEDANDE

Hjälper till att stabilisera och ge stöd åt svaga, ömma eller skadade fotleder.

## PERFEKT FÖR:

Ger stöd vid vanliga skador som vrickningar och stukningar

## VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Förstärkt sidostabilisering hjälper till att förhindra att fotleden viker sig och nya skador uppstår.
  - 2 Justerbar kompression för anpassad passform.
  - 3 Vristremmar som lyfter och stödjer hålfoten.
- Får enkelt plats i skon.

## STORLEK:

Artikel Nummer

46645

CM

20.3-25.4



## ANVÄNDNING:



Öppna alla remmar och för in foten i stödet. För det övre bandet genom spännnet, dra åt och fäst det. Kompressionen ska vara fast, men bekväm.



Dra det vänstra bandet diagonalt över foten, fäst kardborrefästet på motsatta sidan av fotledstödet.



Gör på samma sätt för höger band. Justera banden till önskad komfort och kompression.

Avsedd användning: Ger stöd till stela, ömma eller skadade fotleder.

Material: Polyeten, Nylon, Polyuretan, Polyester, Spandex.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Svenska AB  
Herrjärva torg 4,  
170 67 Solna  
Sweden

**3M**