

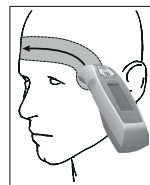
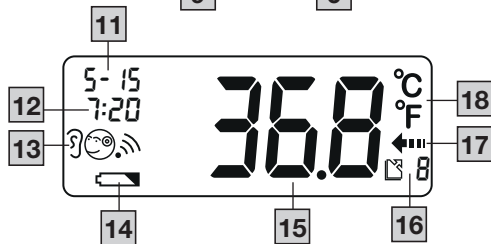


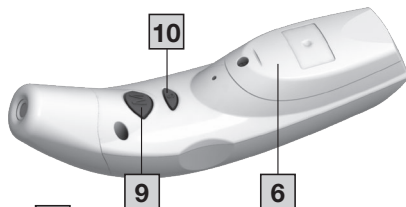

SV Multifunktionstermometer
Bruksanvisning

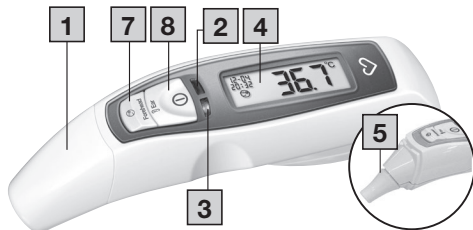

Innehåll

1. I leveransen ingår följande.....	4
2. Teckenförklaring	4
3. Avsedd användning.....	6
4. Varnings- och säkerhetsinformation.....	6
5. Information om termometern	8
6. Produktbeskrivning.....	9
7. Börja använda produkten	9
8. Starta och ställa in termometern	10
9. Mätning	10
9.1 Örontemperaturläge.....	10
9.2 Panntemperaturläge.....	11
9.3 Föremålstemperaturläge	11
9.4 Sparade mätvärden	12
10. Rengöring och underhåll	12
11. Vad gör man om problem uppstår?	12
12. Avfallshantering	13
13. Tekniska specifikationer	13
14. Riktlinjer	14
15. Garanti/service	15



Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Följ varnings- och säkerhetsinformationen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för andra användare. Om produkten överläts till någon annan ska bruksanvisningen följa med.

1. I LEVERANSEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera leveransen för att säkerställa att förpackningen är oskadd och att alla delar finns med. Kontrollera att produkten och medföljande komponenter inte har några synliga skador och att allt förpackningsmaterial har avlägsnats innan du använder produkten. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig då till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.

- Termometer
- 2 st. 1,5 V AAA-batterier (LR03)
- Bruksanvisning
- Skyddshölje

2. TECKENFÖRKLARING

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten för produkten:

⚠ VARNING

Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till lätta eller mindre allvarliga personskador.

OBSERVERA

Betecknar en situation som kan leda till skador. Om den inte undviks kan produkten eller något i dess omgivning skadas.

	Produktinformation Hänvisar till viktig information
	Följ bruksanvisningen Läs igenom bruksanvisningen innan arbetet påbörjas och/eller innan du använder produkten eller apparaten
	Elektriska produkter får inte slängas i hushållsavfallet
	Tillverkare
	CE-märkning Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer

	Märkning för identifiering av förpackningsmaterialet. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1-7 = plast, 20-22 = papper och kartong
	Produkten är skyddad mot främmande föremål ≥12,5 mm och mot vattenstänk
	Likström
	Unique Device Identifier (UDI) Unik produktidentifiering
	Artikelnummer
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Typnummer
	Applicerade delar, typ BF
	Tillåten temperatur och luftfuktighet vid förvaring och transport
	Tillåten temperatur och luftfuktighet vid användning
	Distributör

	Förvaras skyddad mot solljus
	Förvaras skyddad mot regn

3. AVSEDD ANVÄNDNING

Avsett syfte

Termometern är endast avsedd för mätning av en människas kroppstemperatur i hörselgången (örontemperaturläge) eller på pannan (panntemperaturläge). Termometern är endast avsedd för privat bruk i hemmet och inte för kommersiellt bruk.

Målgrupp

Termometern är avsedd för medicinsk vård i hemmet och inte för professionell hälso- och sjukvård. Febertermometern kan användas på nyfödda över 2,5 kg samt på spädbarn, småbarn och barn under uppsikt. Egenvård är möjlig för alla från 12 år.

Kliniska fördelar

Med termometern kan du mäta kroppstemperaturen i hörselgången eller på pannan i hemmiljö.

Temperaturövervakningen sker i °C (resp. °F) med en decimal.

Indikationer

Med termometern kan användaren snabbt och enkelt mäta kroppens temperatur i hörselgången eller på pannan. På så sätt kan kroppstemperaturen övervakas.

Kontraindikationer

Mätningen får inte utföras

- på ett öra med inflammatorisk sjukdom (t.ex. gul flytning, sekretutsöndring)
- efter eventuell öronskada (t.ex. skada på trumhinnan)
- under läkningsfasen efter operation

4. VARNINGS- OCH SÄKERHETS- INFORMATION

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Produktinformation

- Förvara produkten i det rum där den ska användas i minst 30 minuter före mätningen.
- Vänta i cirka 30 minuter om du har tränat, tagit ett bad eller vistats utomhus innan du gör en mätning på pannan.
- Mät din temperatur regelbundet för att få fram din normala genomsnittstemperatur. Om du misstänker feber jämför du din normala genomsnittstemperatur med den aktuella uppmätta temperaturen.
- Termometern är endast avsedd att användas på det mätställe som anges i bruksanvisningen och på människor.
- Termometern kalibreras vid tillverkningen. Om termometern används enligt bruksanvisningen behövs ingen ytterligare kalibrering.
- Kontrollera att sensorspetsen är hel före varje användning. Vänd dig till ditt apoteket om du inte är nöjd med varan. Ta med produkten vid reklamation.
- Har du frågor, tips eller synpunkter besök närmaste Apoteket Hjärtat eller ring Kundservice 0771-405 405.
www.apotekhartat.se

⚠ VARNING

- Ställ ingen egendiagnos och behandla inte på egen hand utifrån mätresultaten utan att först ha konsulterat din behandlande läkare. Påbörja absolut inte någon ny läkemedelsbehandling på egen hand och ändra inte på mängd eller frekvens hos en redan pågående medicinering utan att först ha rådgjort med behandlande läkare.
- De uppmätta värden som du själv har tagit är endast avsedda som information och ersätter inte en läkarundersökning! Konsultera läkare innan du fattar beslut i medicinska frågor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn, djur och skadedjur.
- Barn får inte använda produkten. Medicintekniska produkter är inga leksaker.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.

Risk för skador på produkten

OBSERVERA

- Reparationer får bara utföras av auktoriserade serviceställen. I annat fall upphör garantin att gälla.
- Denna termometer är en ömtålig elektronisk produkt. Utsätt inte produkten för mekaniska stötar och låt den inte falla i golvet.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, extrema temperaturer eller hög luftfuktighet.
- Utsätt inte produkten för vätskor. Produkten är inte vattentät. Undvik att produkten kommer i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Bärbar och mobil högfrekvent kommunikationsutrustning kan påverka produkten.

- Vidrör inte sensorspetsen med fingret.
- Rengör termometern varje gång du har använt den.

ANVISNINGAR FÖR HANTERING AV BATTERIER

⚠ VARNING

- Sätt alltid i batterierna korrekt och med hänsyn till polariteten (+/-). Håll batterierna rena och torra och förvara dem på avstånd från vatten. Välj alltid rätt batterityp.
- Kortslut aldrig batterierna eller kontaktarna i batterifacket.
- Batterier får aldrig laddas, tvångsurladdas, värmas upp, tas isär, deformeras, kapslas in eller modifieras.
- Utsätt aldrig batterier för svetsning eller lödning.
- Blanda aldrig batterier av olika slag, kapacitet (nya och begagnade), storlek och typ i en produkt.
- **Explosionsrisk!** Om ovanstående anvisningar inte följs kan det leda till personskador, överhettning, läckage, luftning, materialskador, explosion eller brand.
- Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Använd skyddshandskar vid rengöringen.
- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare.
- **Risk för sväljning!** Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn. Kontakta läkare omedelbart vid sväljning. Sväljning av batterier kan leda till allvarliga inre brännskador och är förenat med livsfara.
- Låt aldrig barn byta batterier utan uppsikt av en vuxen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Förvara batterier på avstånd från metallföremål i ett väl ventilerat, torrt och svalt utrymme.
- Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, höga temperaturer eller regn.
- Om batterier utsätts för extremt höga temperaturer eller extremt lågt lufttryck kan det orsaka explosion eller läckage av brännbara vätskor och gaser.
- Ta ut batterierna ur produkten om den inte ska användas under en längre tid. Sluta använda produkten om luckan till batterifacket inte längre går att stänga ordentligt.
- Kassera urladdade batterier omedelbart och enligt lokala föreskrifter. Kassera aldrig batterier i öppen eld eller en het ugn.

OBSERVERA

- Vid avfallshantering ska batterier med olika elektrokemiska system förvaras åtskilda.

5. INFORMATION OM TERMOMETERN

Det uppmätta temperaturvärdet varierar beroende på var på kroppen man mäter. På friska personer kan temperaturen variera med mellan 0,2 °C och 1 °C (0,4 °F till 1,8 °F) mellan olika kroppsdelar.

Normalt temperaturområde för olika termometrar:

	Mätvärden	Termometer
Panntemperatur	35,8 °C till 37,6 °C (96,4 °F till 99,7 °F)	Panntermometer
Örontemperatur	36,0 °C till 37,8 °C (96,8 °F till 100,0 °F)	Örontermometer

Muntemperatur	36,0 °C till 37,4 °C (96,8 °F till 99,3 °F)	Konventionell termometer
Rektaltemperatur	36,3 °C till 37,8 °C (97,3 °F till 100,0 °F)	Konventionell termometer



- Jämför aldrig temperaturer som har uppmätts med olika termometrar.
- Tala om för din läkare med vilken sorts termometer och var på kroppen du har mätt kroppstemperaturen. Tänk även på detta när du själv ställer diagnos.

Termometern värms upp om den hålls för länge i handen innan mätningen utförs. Det kan göra att mätresultatet blir felaktigt.

Faktorer som påverkar kroppstemperaturen

- Individuell ämnesomsättning
- Ålder:
Spädbarn och små barn har högre kroppstemperatur än vuxna. Hos barn varierar temperaturen snabbare och oftare. I takt med stigande ålder sjunker den normala kroppstemperaturen.
- Kläder
- Utomhustemperatur
- Tid på dygnet:
Kroppstemperaturen är lägre på morgonen, stiger sedan under dagens lopp och är som högst på kvällen.
- Aktivitet:
Fysisk aktivitet, och i mindre utsträckning mental aktivitet, gör att kroppstemperaturen stiger.



Temperaturmätningen ger det aktuella värdet för en persons kroppstemperatur. Om du är osäker på hur du ska tolka ett uppmätt värde eller om personen har onormala värden (t.ex. feber) bör du kontakta läkare. Detta gäller även vid små temperaturvariationer om personen även har andra sjukdomssymtom, t.ex. oro, kraftig svettning, hudrodnad, hög puls eller yrsel.

6. PRODUKTBEKRIVNING

Tillhörande bilder visas på sidan 3.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Skyddshölje | 2 LED (röd) (feberindikator) |
| 3 LED (grön) | 4 Display |
| 5 Sensorspets med lins (skyddshölje borttaget) | 6 Lucka till batterifacket |

	Knappar	Funktioner
7		Knapp för panntermometerläge
8		Örontermometerläge-/På-knapp
9		Minnesknapp: Hämta sparade värden och spara menyinställningar
10		SET-knapp: Ställa in grundfunktioner

Beskrivning av displayen

- | | |
|---|--|
| 11 Datum | 12 Klockslag |
| 13 Mätläge ("Öra", "Panna", "Föremål") | 14 Symbol "Batterivarning" |
| 15 Visning mätresultat | 16 Symbol "Minne" och minnesplatsnummer |
| 17 Symbol "Mätning pågår" | 18 Mätenhet (°C eller °F) |

7. BÖRJA ANVÄNDA PRODUKTEN

Batterierna finns redan i den nya produkten. Dra bort de utstickande skyddsremarna från batterierna i batterifacket innan du använder termometern första gången. Termometern slås då på automatiskt.

Sätta i batterier

- Lossa skruven till locket på batterifacket och lyft upp locket. **E**
- Placera båda batterierna i batterifacket med polerna vända åt det håll som anges.
- Använd endast 2 st märkesbatterier av typen: 1,5 V AAA-batterier (LR03). Uppladdningsbara batterier får inte användas.
- Stäng sedan batterifacket genom att sätta på locket så att det hakar i.
- Sätt tillbaka batteriluckan med hjälp av skruven som lossades tidigare.

Termometern sätts igång automatiskt och inställningsmenyn visas på displayen ("8. Starta och ställa in termometern").

Byta batterier

När batterierna börjar bli svaga visas en symbol för låg batterinivå . Det går fortfarande att mäta temperaturen, men det är dags att byta batteri. När symbolen för låg batterinivå  blinkar och Lo visas i displayen måste batterierna bytas. Om batterierna är för svaga stängs termometern av automatiskt.

Följ stegen ovan ("Sätta i batterier") för att byta batterier och beakta dessutom stegen nedan:

- Ta ut de tomma batterierna ur batterifacket.
- Sätt i nya batterier. Kontrollera att batteripolerna sitter åt rätt håll.

8. STARTA OCH STÄLLA IN TERMOMETERN

Tryck in knappen  i 1 sekund för att slå på termometern. Produkten genomgår ett kort självtest och på displayen visas alla segment i cirka 1 sekund . Efter genomfört självtest hörs två korta pip ljud och datum och tid samt "- -" visas i viloläge.

Enhet för temperaturvisning, inställning av datum och klockslag

Första gången termometern används, samt efter varje byte av batterier (efter självtestet), visas datum och tid i grundinställningarna (1- 1 00:00). Ställ enbart in enhet för temperaturvisning, datum och klockslag. Gå igenom följande steg vid inställningen: Enhet – År – Månad – Dag – Timmar – Minuter.

- Tryck in knappen  i cirka 3 sekunder för att komma till SET-läget. Det delområde som står i tur att ändras blinkar.
- Tryck på knappen  för att ändra den utvalda inställningen.
- Tryck på knappen  för att spara inställningen.
- Efter denna procedur visar termometerns display OFF och stängs automatiskt av.

9. MÄTNING

9.1 Örontemperaturläge



- En del personer kan ha olika mätvärden i det vänstra och det högra örat. För att kartlägga temperaturförändringar bör du alltid mäta i samma öra på en person.
- Örontermometern får endast användas av barn under uppsikt av en vuxen. I regel kan man mäta temperaturen på barn från 6 månaders ålder. Hos barn under 6 månader är hörselgången fortfarande mycket trång. Det gör att temperaturen hos trumhinnan ofta inte kan registreras, vilket leder till för låga mätresultat.
- Temperaturen får inte mätas i örat på en person med inflammatorisk sjukdom (t.ex. varflöde, sekretutsöndring), efter skador på örat (t.ex. skador på trumhinnan) eller under tillfrisknandet efter en operation. I dessa fall bör du rådfråga din läkare.
- Denna termometer får endast användas utan skyddshölje för engångsbruk.
- Om du har legat på örat under en lägre tid är temperaturen något förhöjd. Vänta en stund eller mät i det andra örat.
- Öronvax kan påverka mätningen, rengör därför örat före mätningen.

Mätning av kroppstemperaturen i örat

- Tryck in knappen  i 1 sekund för att slå på termometern. Efter genomfört självtest hörs två korta pip ljud.
- Ta av höljet genom att trycka lätt uppåt (1) och sedan dra av det framåt (2). 

Säkerställ att sensorspetsen och hörselgången är rena.

Eftersom hörselgången är lätt vinklad måste du dra örat lätt bakåt och uppåt innan du för in sensorspetsen så att den riktas direkt mot trumhinnan. **C**

- För försiktigt in sensorspetsen och tryck in knappen **1** i 1 sekund.
- Släpp knappen **1**. När mätningen är klar hörs ett kort pipljud och det uppmätta värdet visas på displayen.

Om det uppmätta värdet ligger inom normområdet ($< 38^{\circ}\text{C}/100,4^{\circ}\text{F}$) lyser den gröna LED-lampan i 3 sekunder. Om det uppmätta värdet ligger högre ($\geq 38^{\circ}\text{C}/100,4^{\circ}\text{F}$ = feber) tänds den röda LED-lampan.

9.2 Panntemperaturläge

Kontrollera följande innan du påbörjar mätningen:

– korrekt mätområde **D**

Tänk på att:

- fysisk aktivitet, ökad svettbildning på pannan, intag av kärleksmandragande mediciner samt hudirritationer kan leda till felaktiga mätresultat
- pannan måste vara fri från svett, hår, kosmetika och smuts. Om pannan är täckt bör du rengöra den och sedan vänta i 10 minuter för att förbättra det uppmätta värdets noggrannhet.

OBSERVERA

Vi rekommenderar att du gör tre mätningar på pannan. Om de tre mätvärdena skiljer sig åt väljer du det högsta.

Mätning av kroppstemperaturen på pannan

1. Tryck kort på knappen **1** när du vill slå på termometern. Efter ett kort självtest och två korta pipljud är produkten klar för att mäta kroppstemperaturen på pannan.

2. Sätt på skyddshöljet på mät huvudet och placera det mot tinningen, håll in knappen **2** och för termometern över pannan till den andra tinningen. **D**
3. Släpp sedan knappen **2**. När mätningen är klar hörs ett kort pipljud och det uppmätta värdet visas på displayen.

Om mätresultatet ligger under $< 38^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) lyser LED-lampan grönt **3**, vilket betyder att kroppstemperaturen ligger inom det normala intervallet.

Om mätresultatet ligger över $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ($100,4^{\circ}\text{F}$) lyser LED-lampan rött **2**, vilket indikerar att kroppstemperaturen ligger över det normala intervallet.

Mätvärdet sparas automatiskt med datum/tid, minnesplatsnummer och mätläge.

Produkten stängs av automatiskt efter 60 sekunder.

9.3 Föremålstemperaturläge

Om du vill använda termometern för att mäta yttemperatur måste du växla till föremålstemperaturläget.

- Tryck samtidigt in knapparna **M** och **1** i 3 sekunder för att växla till föremålstemperaturläget. På displayen visas **3**.

Produkten slår om till föremålstemperaturläget.

- Tryck på knappen **1** eller **2** panna och rikta sensorspetsen mot det föremål eller den vätska (doppa aldrig ner den i vätskan) som ska mätas med ett avstånd på 3 cm.
- Släpp knappen **1** eller **2** panna. När mätningen är klar hörs ett kort pipljud och det uppmätta värdet visas på displayen.

Tänk på att den visade temperaturen är den som termometern har registrerat och inte den anpassade yttemperaturen. Den går inte att jämföra med pann-/örontemperaturen.

För att växla tillbaka till öron-/panntermometer, tryck in knapparna  och  samtidigt i 3 sekunder tills  slocknar och ett kort pipljud hörs. Genom att stänga av och sedan slå på termometern igen stängs föremålstemperlåget automatiskt av.

9.4 Sparade mätvärden

Produkten sparar automatiskt mätvärdena från de senaste tio mätningarna.

När de tio minnesplatserna är fyllda raderas det äldsta värdet.

Uppmätta temperaturer kan hämtas från minnet på följande sätt:

1. Tryck på -knappen. Det senaste mätvärdet visas. Datum, klockslag, minnesplatsnummer och symbolen för mätlåget samt temperatur visas.
2. Varje gång du trycker på -knappen visas efterföljande mätvärde.

Genom att ta ut batterierna raderas hela minnet för mätvärdena.

10. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör produkten

OBSERVERA

- Sensorspetsen är termometers ömtåligaste del. Hantera sensorspetsen med största försiktighet vid rengöring.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
- Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för användaren och för produkten. ("4. Varnings- och säkerhetsinformation")

Rengör sensorspetsen efter varje användning. Använd en mjuk trasa eller en bomullspinne/tops som kan fuktas med upp till max. 75 % medicinsk alkohol (t.ex. Isopropanol).

Under inga omständigheter får det komma in vatten i produkten.

Använd inte produkten igen förrän den har torkat helt.

Förvaring

OBSERVERA

Produkten får inte förvaras eller användas vid för hög eller låg temperatur eller luftfuktighet ("13. Tekniska specifikationer"), i direkt solljus, i anslutning till elström eller på mycket dammiga platser. De uppmätta värdena kan då bli felaktiga.

Om du inte planerar att använda produkten under längre tid ska batterierna tas ut.

11. VAD GÖR MAN OM PROBLEM UPPSTÅR?

Indikator	Orsak	Åtgärd
"Hi"	Den uppmätta temperaturen är högre än 1. Öron-/pann- termometerläge: 43 °C (109,4 °F) 2. Föremålstemperatur- läge: 100 °C (212 °F)	Använd endast termometern inom de angivna temperaturområdena. Rengör först sensorspetsen. Vid upprepad felindikering bör du vända dig till närmaste Apoteket Hjärtat eller vår Kundservice.

Indikator	Orsak	Åtgärd
"Lo"	Den uppmätta temperaturen är lägre än 1. Öron-/panntermometerläge: 34 °C (93,2 °F) 2. Föremålstemperaturläge: 0 °C (32 °F)	Använd endast termometern inom de angivna temperaturområdena. Rengör först sensorspetsen. Vid upprepade felindikering bör du vända dig till närmaste Apoteket Hjärtat eller vår Kundservice.
	Batterierna är svaga.	Byt batterierna.
"Err"	Drifttemperaturen ligger inte inom området 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F).	Använd endast termometern inom de angivna temperaturområdena.

12. AVFALLSHANTERING

Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet när den ska kasseras.

Lämna produkten till en återvinningscentral.

Produkten ska avfallshandteras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska apparater – WEEE. Vänd dig till ansvariga kommunala myndigheter om du har några frågor om avfallshandtering.



- Förbrukade, urladdade batterier ska kasseras i märkta samlingsbehållare. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt sätt.
- Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:
Pb = batteriet innehåller bly,
Cd = batteriet innehåller kadmium,
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



13. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Om produkten används på annat sätt än enligt specifikationerna kan felfri funktion inte längre garanteras!

Exaktheten hos denna termometer har kontrollerats noggrant och produkten har utvecklats för att hålla länge.

Vid användning av produkten inom vården ska mättekniska kontroller utföras med lämpliga hjälpmedel. Närmare uppgifter om hur du kontrollerar exaktheten kan du få från vår Kundservice.

Namn och modell	FT 65
Typ	FT 65
Mätmetod	Infraröd mätning
Grundfunktioner	Mätning av örontemperatur Mätning av panntemperatur Mätning av föremålstemperatur
Måttenheter	Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F)
Driftsätt	Justeringsläge
Driftförhållanden	15 °C till 35 °C (59 °F till 95 °F) vid en relativ luftfuktighet på ≤ 85 %, 700–1060 hPa omgivningstryck
Förvarings- och transportförhållanden	-25 °C till 55 °C (-13 °F till 131 °F) vid en relativ luftfuktighet på ≤ 85 %
Lägsta mättid:	≤1 sekund

Klinisk mät noggrannhet	Örontermometerläge (på trumhinnan): Kliniskt systematiskt fel: -0,03 °C Överensstämelsegräns: 0,36 °C Klinisk repeterbarhet: ± 0,07 °C
	Panntermometerläge (på pannan): Kliniskt systematiskt fel: -0,04 °C Överensstämelsegräns: 0,38 °C Klinisk repeterbarhet: ± 0,07 °C
Mätområden	Öron- och panntemperaturläge: 34 °C–43 °C (93,2 °F–109,4 °F) Föremålsläge: 0 °C–100 °C (32 °F–212 °F)
Mät noggrannhet i laboratorium	Örontermometerläge: ±0,20 °C (±0,40 °F) från 35 °C till 42 °C (95 °F till 107,6 °F), utanför detta mätområde ±0,30 °C (±0,5 °F)
	Panntermometerläge: ±0,20 °C (±0,40 °F) från 35 °C till 42 °C (95 °F till 107,6 °F), utanför detta mätområde ±0,30 °C (±0,5 °F)
Föremålsläge:	±1,5 °C (±2,7 °F) <30 °C (86 °F); ±5 % >30 °C (86 °F)
Minnesfunktion vid mätning av kroppstemperatur	Sparar automatiskt de senaste tio mätvärdena.

Ljudsignal	Hörs när produkten startas, under mätningen samt när mätningen avslutas och kroppstemperaturen ligger över det normala intervallet (= feber).
Display	LCD
Energisparfunktioner	Produkten stängs av automatiskt efter 60 sekunder.
Mått Bredd x längd x höjd	38,2 x 138,0 x 46,5 mm
Vikt	cirka 63 g (utan batterier)
2 st. 1,5 V AAA-batterier (LR03)	Drifttid för cirka 2000 mätningar
Kapslingsklass	IP22: Skydd mot främmande föremål som är större än 12,5 mm i diameter och drop-pande vatten vid en lutning på 15°
Förväntad livslängd	7 år
Klassificering	Internt driven medicinelektrisk produkt. Kontinuerlig drift. Applicerad del, typ BF
Skärmupplösning	0,1 °C (°F)

Serienumret står på produkten eller i batterifacket.

14. RIKTLINJER

Denna produkt motsvarar den europeiska standarden EN 60601-1-2 (grupp 1, klass B, överensstämmelse med CISPR11, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-8) och omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder avseende elektromagnetisk kompatibilitet. Tänk på att bärbar och högfrekvent mobil kommunikationsutrustning kan

påverka produkten. Du kan få mer information genom att kontakta Kundservice på angiven adress.

15. GARANTI/SERVICE

Vänd dig till ditt apoteket om du inte är nöjd med varan. Ta med produkten vid reklamation. Har du frågor, tips eller synpunkter besök närmaste Apoteket Hjärtat eller ring Kundservice 0771-405 405. www.apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat, Box 4075, 169 04 Solna, Sverige

Information om elektromagnetisk kompatibilitet

- Produkten kan användas i alla miljöer som anges i bruksanvisningen, däribland i hemmiljö.
- Produkten kan ha begränsad användbarhet i närheten av elektromagnetiska störningar. Det kan t.ex. innebära att felmeddelanden visas eller att displayen/produkten slutar fungera.
- Undvik att använda denna produkt i omedelbar närhet av andra produkter eller med andra produkter staplade på varandra eftersom det kan leda till felaktig drift. Om det ändå är nödvändigt att använda produkten på ovan beskrivet sätt ska denna produkt och de andra produkterna hållas under uppsikt för att säkerställa att de fungerar som de ska.
- Användning av andra komponenter än dem som tillverkaren av denna produkt har angett eller tillhandahållit kan leda till förhöjd elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos produkten, vilket kan göra att den inte fungerar korrekt.
- Håll bärbara RF-kommunikationsapparater (inklusive kringutrustning såsom antennkablar och externa antenner) minst 30 cm från alla produktdelar, inklusive alla medföljande kablar.

- Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till en försämring av produktens prestanda.

Information om incidentrapportering

För användare/patienter i den Europeiska unionen och identiska regleringssystem (förordning [EU] 2017/745 för medicintekniska produkter [MDR]) gäller följande: Om en allvarlig incident skulle inträffa under eller på grund av användningen av produkten ska du rapportera detta till tillverkaren och/eller dennas auktoriserade representant samt till den nationella myndigheten i den medlemsstat där du befinner dig.



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm • Germany
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com

